


# MENOPUR® MULTIDOSE PEN GEBRAUCHSANWEISUNG



Ihr Arzt oder Ihre Ärztin hat Ihnen Menopur® Multidose Pen verschrieben und gezeigt, wie Sie den Pen richtig anwenden. Bitte beachten Sie folgende Anweisungen zur Verwendung:


## VORBEREITUNG

1

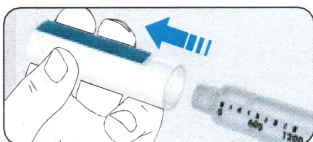


Waschen und trocknen Sie Ihre Hände, bevor Sie den Pen benutzen. Ziehen Sie die Kappe vom Pen ab.

2

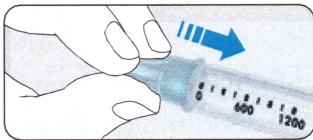

Verwenden Sie für jede Injektion immer eine neue Nadel. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Nadel und befestigen Sie dann die Nadel am Pen.

3

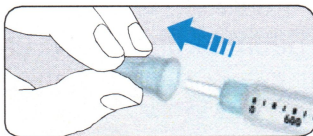

Entfernen Sie die äussere Schutzkappe (aufbewahren). Entfernen Sie dann die innere Schutzkappe der Nadel (wegwerfen).


**FERRING**

PHARMACEUTICALS

Falls der Pen bereits verwendet wurde, gehen Sie zu Schritt **7**

### Bei der 1. Verwendung: Den Pen vorbereiten


**4**

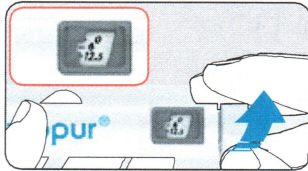


Drehen Sie den Dosierring im Uhrzeigersinn, bis das Tröpfchensymbol an der Dosisanzeige ausgerichtet ist.

**5**

Halten Sie den Pen mit der Nadel nach oben und klopfen Sie auf die Patrone, damit alle Luftblasen nach oben steigen.

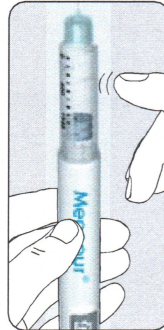


**6**

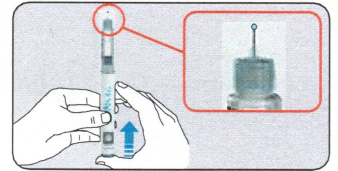

Drücken Sie den Injektionsknopf, bis die Zahl «0» angezeigt wird und ein Flüssigkeitströpfchen an der Nadelspitze erscheint. Wenn kein Tropfen erscheint, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6.

**7**

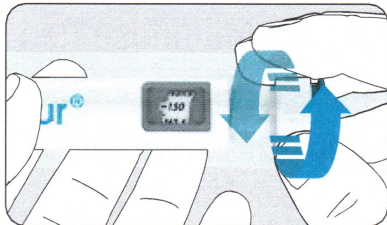


Drehen Sie den Dosierring, bis die verordnete Dosis im Anzeigefenster erscheint (Ausrichtung mit der Dosisanzeige).

Falls versehentlich eine falsche Dosis eingestellt wurde, lässt sich die Dosis in beide Richtungen nachjustieren: Drehen Sie den Dosierring, bis die richtige Dosis erreicht ist.

Drücken Sie während der Auswahl der Dosis nicht auf den Injektionsknopf, um einen Verlust des Medikaments zu vermeiden.

## DURCHFÜHREN DER INJEKTION

**8**

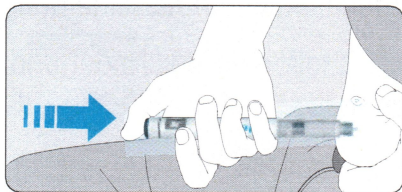

Reinigen Sie die Injektionsstelle mit einer alkoholgetränkten Kompresse, kneifen Sie dann die Haut und führen Sie die Nadel ein, während Sie das Fenster mit der Dosisanzeige sichtbar halten.

Wenn die Nadel eingeführt ist, drücken Sie den Injektionsknopf mit dem Daumen ganz nach unten, bis die Zahl «0» mit der Dosisanzeige ausgerichtet ist.



Warten Sie 8 Sekunden.

Lassen Sie den Injektionsknopf los und ziehen Sie dann die Nadel heraus. Wenn an der Injektionsstelle Blut erscheint, drücken Sie die Einstichstelle mit einer Kompresse oder einem Wattebausch ab.

## Anwendungsvideo



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und loggen Sie sich ein mit dem Benutzernamen "patient" und dem Passwort "patient2024!", um das Anwendungsvideo für Menopur® Multidose Pen aufzurufen.



Kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie Fragen zur Anwendung von Menopur® Multidose Pen haben.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Packung beiliegenden Patienteninformation oder fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin.


Stempel der medizinischen Fachkraft

**Meldungen Pharmakovigilanz:** Die Sicherheit unserer Arzneimittel ist uns ein wichtiges Anliegen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit der Arzneimittel zur Verfügung stehen. Nebenwirkungen können an Ihren Arzt oder Apotheker, an das Schweizerische Heilmittelinstitut oder an die Ferring AG direkt telefonisch (+41 41 768 96 96) oder per E-Mail (SafetyMailboxSwitzerland@ferring.com) gemeldet werden.



© 2024 Ferring AG, Baarermatte, 6340 Baar, Tel. 041 768 96 96, [www.ferring.ch](http://www.ferring.ch)

**FERRING**  
PHARMACEUTICALS

9

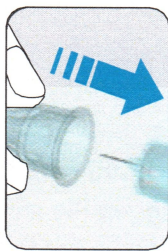

Setzen Sie die äussere Nadelkappe mit einem festen Druck wieder auf die Nadel.

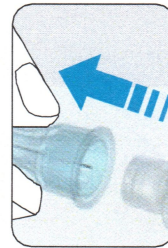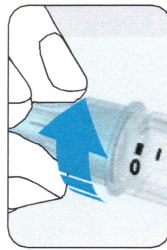


Schrauben Sie die Nadel ab, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie vom Pen zu entfernen.



Entsorgen Sie die benutzte Nadel nach dem Gebrauch in den mitgelieferten Sammelbehälter für gebrauchte Nadeln.

10

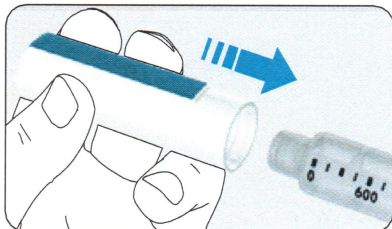

Schliesslich setzen Sie die Kappe des Pens wieder auf den Pen, um ihn zwischen den Injektionen zu schützen.

## AUFTEILEN DER DOSIS VON MENOPUR®

Es ist möglich, eine **geteilte Injektion** vorzunehmen, bei der ein Teil der Dosis mit dem aktuellen Pen und der Rest der Dosis mit einem neuen Pen injiziert wird:

1. Notieren Sie die **verordnete Dosis** in Spalte A.
2. Notieren Sie die im **aktuellen Pen verbleibende Dosis** in Spalte B und führen Sie die Injektion dieser Dosis durch. Die verbleibende Dosis ist im Dosisanzeigefenster sichtbar, wenn sich der Dosiererring in der höchsten Position befindet.
3. **Subtrahieren** Sie die Zahl in Spalte B von der Zahl in Spalte A und notieren Sie das Ergebnis in **Spalte C**: Dies ist die verbleibende Injektionsdosis des neuen Pens.
4. Bereiten Sie den neuen Pen vor (Schritte 1 bis 7) und führen Sie die Injektion damit durch (Schritte 8 bis 10).

A = verordnete Dosis	B = verbleibende Dosis im aktuellen Pen	C = Dosis im neuen Injektionspen
112,5	75 (75)	37,5 (37,5 auswählen)
125	50 (50)	75 (75 auswählen)
300	181,25 (175 und 1 Strich)	118,75 (112,5 und 1 Strich = 112,5 plus 1 Klick auswählen)